



Væskebasert prøvetakning- og transportsystem for dyrkning av patogene tarmbakterier.

Prosedyre for prøvetakning



Unilabs Laboratoriemedisin bruker *Copan fecalSwab* for dyrkning av tarmpatogene bakterier.

Det er viktig å følge bruksanvisningen.

Bruksanvisning:

1. Ta ut prøvetakningsrør og pensel og utfør prøvetakning:

Velg en av følgende prøvetakingsmateriale (a eller b)

- a. Prøvetakning i avføring: ved normal/løs avføring føres penselen ned i avføringen og opp igjen, ved hard avføring brukes penselen som en spatel for å få med en liten mengde avføring over i prøvetakningsrøret
 - b. Prøvetakning direkte i rektum; penselen føres inntil 1-2 cm inn i rektum
2. Åpne korken og sett penselen med prøvematerialet i røret
 3. Brekk applikatoren (penselpinnen) i knekkpunktet
 4. Skru på korken
 5. Merk prøverøret med pasientinformasjon og dato for prøvetakning
 6. Merk rekvisisjonen med pasientinformasjon, dato for prøvetakning og kliniske opplysninger
 7. Oppbevar prøven i kjøleskap inntil forsendelse.

For English: see next page



Instruction for sampling:



Transport medium is semi-liquid Cary Blair – suitable for the transport of enteric bacteria.

Read conscientiously

1. Open the pouch containing the fecalSwab
2. Remove the tube and swab and collect the specimen either from stool sample or rectal canal (1/2 cm into rectum)
3. Unscrew cap and insert swab into the tube
4. Break the applicator at the point indicated by the colored line
5. Replace cap on tube and screw tightly.
6. Mark the sample with name of patient and date of sample collection
7. Mark the requisition with name of patient, date of birth, date of sample collection and symptoms.
8. Store the sample in refrigerator before sending