










Prøvetaking og oppbevaring før forsendelse

Husk opplysninger om klinikk og prøvemateriale/prøvetakingssted.

Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men

dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap. OBS! Noen unntak, se merknad.

For mer informasjon, se vår labhåndbok www.labhandbok.no.

UNDERSØKELSE		PRØVEMATERIALE	PRØVETAKINGSUTSTYR	NR.	BILDE	MERKNAD
<u>Generelt</u>	Urindyrkning	Urin	V-Monovette Steril container m/borsyre	2)		Transporttid maks 2 døgn
<u>Generelt</u>	Bakteriologisk u.s. MRSA, ESBL, VRE Legionella	Sekret/puss	Copan pensel Sort/oransje kork	1)		Transporttid maks 3 døgn
<u>Generelt</u>	Dermatofytt DNA	Negl, hudavskrap	Steril container	10)		Transporttid maks 3 døgn
<u>Generelt</u>	Gjær-/muggsopp dyrkning	Sekret/puss	Copan pensel Sort/oransje kork	1)		Transporttid maks 3 døgn
<u>Generelt</u>	Herpes simplex 1+2 og Varicella zoster DNA	Sekret fra lesjoner	UTM RT + tykk pensel	4)		Sendes så snart som mulig
<u>Mage/tarm</u>	Tarmpatogene bakterier	Fæces	FecalSwab	5)		Transporttid maks 3 døgn
<u>Mage/tarm</u>	Parasitter	Fæces	Para-Pak Ecofix	6)		Transporttid maks 6 døgn Oppbevares alltid i romtemp.







**Prøvetaking og oppbevaring før forsendelse**

Husk opplysninger om klinikk og prøvemateriale/prøvetakingssted.

Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men

dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap. OBS! Noen unntak, se merknad.

For mer informasjon, se vår labhåndbok www.labhandbok.no.

UNDERSØKELSE	PRØVEMATERIALE	PRØVETAKINGSUTSTYR	NR.	BILDE	MERKNAD	
<u>Mage/tarm</u>	Clostridium difficile A+B	Fæces	FecalSwab eller steril container m/skje	5) 7)		Transporttid maks 4 døgn Rett i kjøleskap før forsendelse
	Rota-/adeno virus Noro-/Sapo virus	Fæces	Steril container m/skje	7)		Transporttid maks 4 døgn Rett i kjøleskap før forsendelse!
	Helicobacter pylori antigen				Transporttid maks 3 døgn	
<u>Luftveier</u>	Bakterier DNA Virus RNA	Nasopharynx	UTM RT + tynn pensel	4)		Sendes så snart som mulig
<u>Venerologi dyrkning</u>	Gruppe B streptokokk N. gonorrhoeae (NG) Gardnerella vaginalis Gjærsopp Trichomonas vaginalis	Sekret/puss	Copan pensel Sort/oransje kork	1)	 OBS! Gr.B strept.+ Trichomonas vaginalis = 2 pensler!	Transporttid maks 3 døgn Unntak: NG maks 2 døgn
<u>Venerologi DNA</u>	Chlamydia trachomatis Mycoplasma genital N.gonorrhoeae	Sekret Urin	Cobas PCR Female Cobas PCR Urine	3)		Transporttid < 90 døgn
<u>Serologi</u>	Antigen/antistoff	Serum	Gelglass 5 ml = 6 analyser	9)		Sendes så snart som mulig