

UNI INFOBREV

UNILABS LABORATORIEMEDISIN

Nytt prøvemateriale til analysering av MMA (metylmalonsyre)

Fra og med 21.mai 2021 endres prøvematerialet for MMA til Li-Heparin plasma.

Dette skyldes nye rutiner hos vårt samarbeidslaboratorium i Sverige.

Det blir ingen endringer i referanseområdet.

Røret, grønn kork med gul ring, skal vendes forsiktig 8 – 10 ganger etter prøvetakningen og sentrifugeres (ved 2000 g i 10 minutter og værelsestemperatur) straks, eller senest innen 2 timer.

Etter sentrifugering skal røret oppbevares stående i påvente av transport til laboratoriet.

