














Prøvetakning og oppbevaring før forsendelse

Husk opplysninger om klinikk og prøvemateriale. Prøven kan oppbevares i romtemp, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap. OBS! noen unntak for fæces. Se for øvrig vår labhåndbok: www.labhandbok.no










	Undersøkelse	Prøvemateriale	Prøvetak.utstyr	Remisse nr	Bilde	Bilde
Generell bakteriologi	Vanlig bakt, MRSA,	Sekret/puss	Copan transp.med Sort/orange kork	1)		
Generell bakteriologi	Legionella	Ekspektorat	Copan transp.med Sort kork	1)		
Urin dyrkning	Urin	Urin	Steril container m/ borsyre	2)		
Sopp obs! prøvetaking	Dermatofytter PCR	Hud/neglavskrap	Steril container	1b)		
Sopp obs! prøvetaking	Gjær- og muggsopp	Sekret/puss	Copan transp.med Sort/orange kork	1)		
Venerologi dyrkning	Gr.B strep, Neisseria gonor. Gardnerella, gjær, trich.vagin.	Sekret/puss	Copan transp.med Sort/orange kork	1)		
Venerologi PCR	Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium Neisseria gonorrhoeae	Urin/sekret	Cobas PCR urine Cobas PCR female	3)		
Luftveis PCR	<u>Pakke 1</u> Chlamydophila pneum Mycoplasma pneumoniae Bordetella pertussis	Nasopharynx	Copan UTM-RT Virus transp.med	4)		
”	<u>Pakke 2</u> Influenza: A+B, RS: A+B Parainfluenza: 1+2+3+4	Nasopharynx	Copan UTM-RT Virus transp.med	4)		
16.02.08						

Prøvetakning og oppbevaring før forsendelse

Husk opplysninger om klinikk og prøvemateriale. Prøven kan oppbevares i romtemp, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap. OBS! noen unntak for fæces. Se for øvrig vår labhåndbok: www.labhandbok.no



	Undersøkelse	Prøvemateriale	Prøvetak.utstyr	Remisse nr	Bilde	Bilde	
	Luftveis IF	Adenovirus	Nasopharynx	Copan UTM-RT	4)		
	PCR annet	Herpes simples type 1+2 Varicella zoster/herpes zoster	Sekret fra lesjoner	Copan UTM-RT	4)		
	Fæces	Patogene tarmbakterier	Fæces	Fecal Swab	5)		
	”	Parasitter	Fæces	Para-Pak Ecofix	6)		Oppbevares i romtemperatur før forsendelse
	”	Clostridium Difficile	Fæces	Fecal Swab eller Steril container m/skje	7)		Oppbevares i kjøleskap før forsendelse
	”	Rota-/Adenovirus-/Norovirus Helicobacter pylori antigen	Fæces	Steril container m/skje	7)		Oppbevares i kjøleskap før forsendelse
	Serologi	Antistoff/antigen Undersøkelser	Serum	Gelrør, 5ml Sentrifugeres. Et rør nok til 6 analyser	9)		Et rør nok til 6 analyser